

# クイックナビ™-Flu+COVID19 Ag

## 抗原検査 検査方法ガイド

体外診断用医薬品

### 【使用者向け使用の手引き】

#### 内容物の確認

検査実施前に内容物をご確認ください。



① テストデバイス



② 検体浮遊液



③ 鼻腔用滅菌綿棒



④ 試料ろ過フィルター

#### 検体採取・検査

① 滅菌綿棒は、綿球から5～6cm 付近を指でつまむと採取しやすくなります。

綿球 軸  
約1.5cm この付近を指でつまむ (綿球には触らない)

② 鼻の孔の入り口から2cm程度綿棒を挿入し、綿棒を5回転、5秒待ち、綿球を十分に湿らせます。

5回転  
そのまま5秒待つ

③ 回しながら上下につまんで

十分に浮遊

綿球に付着した検体を移行させる

④ 絞り出しながらかつまんで

⑤ しっかりと装着

⑥ ゆっくりと逆さまにつまんで

試料 [3滴] を滴加穴へ

⑦ 15～30℃で静置 10分 そのままで…

● 判定はラベル表記の時間(10分)経過後、速やかに行います。

#### 判定図例

判定部写真	C SBA	C SBA	C SBA	C SBA
判定	新型コロナウイルス陽性	インフルエンザA型陽性	インフルエンザB型陽性	陰性

● 上記は判定例を模式的に表したものであり、実際の見え方とは異なります。判定に迷った場合は医療機関を受診してください。

## 1 検査後の対応\*

判定結果		対応
新型コロナ	インフルエンザ	
陽性(+)	陰性(-)	健康フォローアップセンターへの登録を行うとともに、自宅での療養を行い、体調変化時には健康フォローアップセンターに連絡する。
陰性(-)	陽性(+)	解熱鎮痛剤等の使用による症状の緩和などの対応を図りつつ、希望する場合には医療機関の受診等を行うことも検討する。
陽性(+)	陽性(+)	健康フォローアップセンター等への登録を行うとともに、症状が重いなど受診を希望する場合にはかかりつけ医・発熱外来の受診や、電話診療・オンライン診療を行うことも検討する。
陰性(-)	陰性(-)	他の感染症に罹患しているおそれがあるため、適切に医療機関の受診等を行うことを検討する。

※ 特にインフルエンザは、発病初期はウイルス量が少なくウイルス抗原を検出できない場合があることが知られています。

- 指定された静置時間を過ぎた場合、検査キット上に表示される結果が変わることがありますので、必ず指定された時間で判定してください。本キットの結果を医療機関等に提示する場合も考慮して、「症状が出た時刻」と「本キットを使用した時刻」をメモした紙と一緒に判定部分の写真を撮影することをおすすめします

## 2 受診方法の相談等\*

新型コロナウイルス抗原陽性の場合は、健康フォローアップセンターに登録してください。

症状が重いなど受診を希望する場合は、受診・相談センターに相談し、かかりつけ医・発熱外来の受診や電話診療・オンライン診療をご検討ください。

※ 院内感染を防止するため、緊急の場合を除いて、連絡なく医療機関に直接受診することは控えてください。

下記 URL において、各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先がまとめられています。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html)



## 3 抗原検査キットの保管等\*

区分	取扱い方法
保管方法	常温（冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してから使用）
廃棄方法	ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）を廃棄するときは、ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。 参考：新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方（リーフレット） <a href="http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf">http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf</a>

\* 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて（別添2）（厚生労働省 事務連絡 令和4年12月9日）

厚生労働省 **新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）**はこちらの二次元バーコードを読み取りご覧ください。



【問い合わせ先】

**デンカ株式会社**

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

フリーダイヤル 0120-206-072

受付時間 9:00～17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

発行日2023年1月

IVD-2022-110233-01